

	<h1 style="text-align: center;">Guida Rapida EyeRad</h1> <h2 style="text-align: center;">Versione 3.1.0</h2>	Codice	TD01.A52
		Edizione	1
		Revisione	0
		Pagina	1 / 1

1 RICHIESTA INFO



Per richieste (manuale cartaceo o accesso all'area riservata per scarico manuali e/o software) contattare il fabbricante al seguente link:

<https://www.gsquared.it/it/mandaci-una-e-mail-2>

2 INSTALLAZIONE SOFTWARE



Il software deve essere installato da tecnici informatici con conoscenze di base in merito agli argomenti relativi a PACS/RIS, vedi **Manuale di Installazione**.

3 PRIMO ACCESSO



Cliccare sull'icona **EyeRadQR** per aprire il modulo di interrogazione dell'archivio di EyeRad.

Al **login** inserire le credenziali rilasciate dal tecnico installatore (l'utente al primo accesso dovrà digitare una nuova **password** e confermarla).



Dal **login** è possibile caricare il **Manuale d'Uso** di **EyeRad**, cliccando sulla voce di menu **About** e poi premendo, nella schermata che si apre, il bottone **Manuale** in basso a sinistra.

4 SELEZIONE ESAME DA VISUALIZZARE

Dalla schermata di **EyeRadQR** che si apre dopo aver inserito le credenziali di login è possibile selezionare l'esame che si vuole visualizzare interrogando il **database locale**, dove vengono inviati gli esami dalle diagnostiche o recuperati dal PACS, oppure caricando il contenuto di un DICOMDIR o di immagini DICOM presenti su FileSystem.

Selezionato l'esame è sufficiente premere il bottone **Visualizza** per aprire le immagini radiologiche sui monitor medicali.


5 NAVIGAZIONE TRA LE IMMAGINI DELL'ESAME CARICATO

Le immagini vengono caricate nel modulo di visualizzazione, che si presenta essenzialmente suddiviso in due aree funzionali l'area superiore che contiene le **toolbar** di gestione e l'area centrale che è destinata a contenere le finestre di visualizzazione degli esami (**viewer**).


Le toolbar contengono tutte le funzionalità utili per la navigazione e la manipolazione delle immagini.

E' possibile vedere la spiegazione di cosa fa ogni bottone posizionandosi, dopo aver selezionato con un clic una qualsiasi immagine visualizzata, con il mouse in corrispondenza del bottone interessato per qualche secondo; apparirà un rettangolo con la descrizione della funzione del bottone (**ToolTipText**).



Per l'uso dettagliato di **EyeRad** si rimanda al **Manuale d'Uso** caricabile a partire dall'icona **Info**  presente nella toolbar (premendo, nella schermata che si apre, il bottone **Manuale** in basso a sinistra).

6 USCITA DA EYERAD

La chiusura di **EyeRad** si fa cliccando sull'icona  presente sulla **Toolbar di sistema** e poi chiudendo la finestra di **EyeRadQR**.